



### クレンジング

1  
お顔の汚れを落とします。メイクをしていなくてもホコリや皮脂などを落とすためにもクレンジングは行ってください。クレンジングを優しく塗って、10秒くらい放置すると汚れが浮いてきます。



### 拭き取り

2  
浮いてきた汚れをスポンジで優しく拭き取ってください。汚れたスポンジはボールに入れておいてください。



### 美容液を塗布

3  
ヒト幹細胞美容液を塗布。全部使い切らずに何度かに分けて塗っていきます。



### 【スタート】ボタンを押す

4  
時間はあらかじめ20分に設定されています。STARTボタンを押して施術を始めてください。



### 施術

5  
マシン先端部分の針が全体的に肌に当たるように施術していきます。首、あご、ほほ、鼻と下から上にくるくると回しながら行ってください。左右10分ずつを目安に、気になる箇所は重点的にマシンを当てていくと効果的です。

※注意 肌から離れていたり、浮いてしまっていると上手く美容液が浸透しません。



### マシン操作

6  
マシンの強さを変更する際はMODEボタンを押して変更してください。額や鼻など少し骨ばった箇所は痛みを感じやすいのでお気を付けください。

※マシン設定※  
 額&目周り ... 1  
 首 ... 5  
 頬&フェイスライン ... 3  
 身体(二の腕など) ... 6



### 拭き取り

7  
施術後は毛穴の汚れや余分な角質などがお肌に付着しています。ホットタオルで優しく拭き取ってください。

※備考  
 美容成分はしっかりと奥まで浸透していますので、拭き取っても美容成分が落ちることはありません。



### 整肌

8  
拭き取りの後は、再度化粧水、仕上げにクリームを塗布してください。