



クレンジング

1

お顔の汚れを落とします。メイクをしていなくてもホコリや皮脂などを落とすためにもクレンジングは行ってください。クレンジングを優しく塗って、10秒くらい放置すると汚れが浮いてきます。



拭き取り

2

浮いてきた汚れをスポンジで優しく拭き取ってください。汚れたスポンジはボールに入れておいてください。



ジェルをハンドピースへON

3

ハンドピースを持ち、ハイフ用ジェルをハンドピースへ乗せます。沢山は乗らないので一度に乘せる量は、上の写真くらいです。ジェルは施術中に足りなくなったら随時追加で塗布します。



ジェルを塗布

4

マシンを動かす前に、ジェルを塗ったハンドピースを肌へ密着させ、くるくると回しジェルを広げます。



施術スタート

5

スタートボタンを押し、ジェルを塗布した部分にハンドピースをしっかり密着させてくるくると円を描くように回します。回している状態のまま、ハンドピースのボタンを押します。

※注意 しっかりハイフを当てるためにもハンドピースはしっかりと肌へ密着させ、必ず動かしながら施術してください。



施術中の注意

6

ハイフ施術は、照射禁止箇所やパワー設定の注意点等がございます。マシン画面の見方等も最初にスタッフがご案内させていただきますが、お部屋にも掲示しておりますのでしっかりとご確認の上、施術頂きますようお願いいたします。



拭き取り

7

施術が終了したら、残ったジェルをタオル等で拭き取ります。



整肌

8

当サロンお勧めのヒト幹細胞コスメで整肌して頂きます。ハイフ施術後は、乾燥しやすくなりますのでしっかりと保湿をして頂くようお願いいたします。