



拭き取り

ホットタオルで頭皮の汚れをふき取ります。1～2分ほどホットタオルで地肌をしっかり拭いてください。

1



炭酸ローションを塗布

炭酸ローションを塗布します。気になる箇所を中心に頭皮全体に行き渡るように塗ってください。

2



揉みこむ

頭皮にしっかり揉みこんで美容成分を浸透させてください。ヒト幹細胞と炭酸で細胞が活性化されます。

3



スカルプローションを塗布

頭皮に当たるように、スカルプローションを塗布してください。

4



【スタート】ボタンを押す

時間はあらかじめ20分に設定されています。STARTボタンを押して施術を始めてください。

5



マシン操作

マシンの強さは6に設定されています。痛みが強い場合はMODEボタンを押すとモードが切り替わり弱いパワーでの施術が可能です。

※マシン設定※
 額&目周り … 1 頬&フェイスライン … 3
 首 ……………… 5 身体(頭皮) ……………… 6

分け目を作りながら、スカルプローションと塗布、マシンで刺激するという工程を繰り返し、気になる部分を中心に行ってください。



施術

マシンの先端のトゲゲ部分がしっかり頭皮に当たるようにして施術を行ってください。

7



タオルドライ

施術が終わりましたら、タオルで濡れてしまった髪を拭いてください。

※備考
 スカルプ成分はしっかりと奥まで浸透していますので、拭き取ってもスカルプ成分が落ちることはありません。

8

